

Información sobre como descargar los registros de los eventos.



1) En primer lugar, debe retirarse la batería principal, pulsando el botón lateral.



2) De esta manera, quedará a la vista la ranura donde deberá insertarse la tarjeta de datos con la esquina cortada hacia la derecha. Empujarla hacia adentro hasta que haga click.

Volver a insertar la batería principal.

El equipo a continuación realizará un autotest de las baterías, y luego se apagará.

A continuación, encender el aparato con el botón ON/OFF, y una vez que el equipo comience a hablar, presione nuevamente el botón ON/OFF sin soltarlo por aproximadamente 5 segundos hasta que comience a hablar diciendo "Transferencia a la tarjeta de datos".

Suelte el botón hasta que la transferencia de datos sea completa y correcta.

El equipo se apagará solo.

A continuación, saque nuevamente la batería principal, y extraiga la tarjeta de datos presionándola ligeramente hacia dentro y luego soltándola, con lo cual será parcialmente expulsada.



La tarjeta luego puede ser leída con un lector convencional como el que se muestra en la foto. que se conecta al puerto USB, y a su contenido se accede con el software gratuito que se descarga de aquí
<http://www.defibtech.com/products/eventview.html>

Inserte nuevamente la batería principal, luego de lo cual el aparato por si solo realizará un autotest de baterías, y se apagará solo, quedando nuevamente pronto para ser usado.